


Configurare un Tracciatore

Benvenuto!

Questa guida ti aiuterà a **configurare un tracciatore per le lenti LuxOptic**. Per prima cosa **accedi alla Tua Area Riservata** attraverso l'apposito portale shop.laboratorioottico.it con le credenziali che ti sono state assegnate.

Accedi alle **Impostazioni** attraverso l'icona in alto a destra e poi spuntare la casella **Tracer Disponibile**. A questo punto comparirà l'opzione **Add New Tracer**.

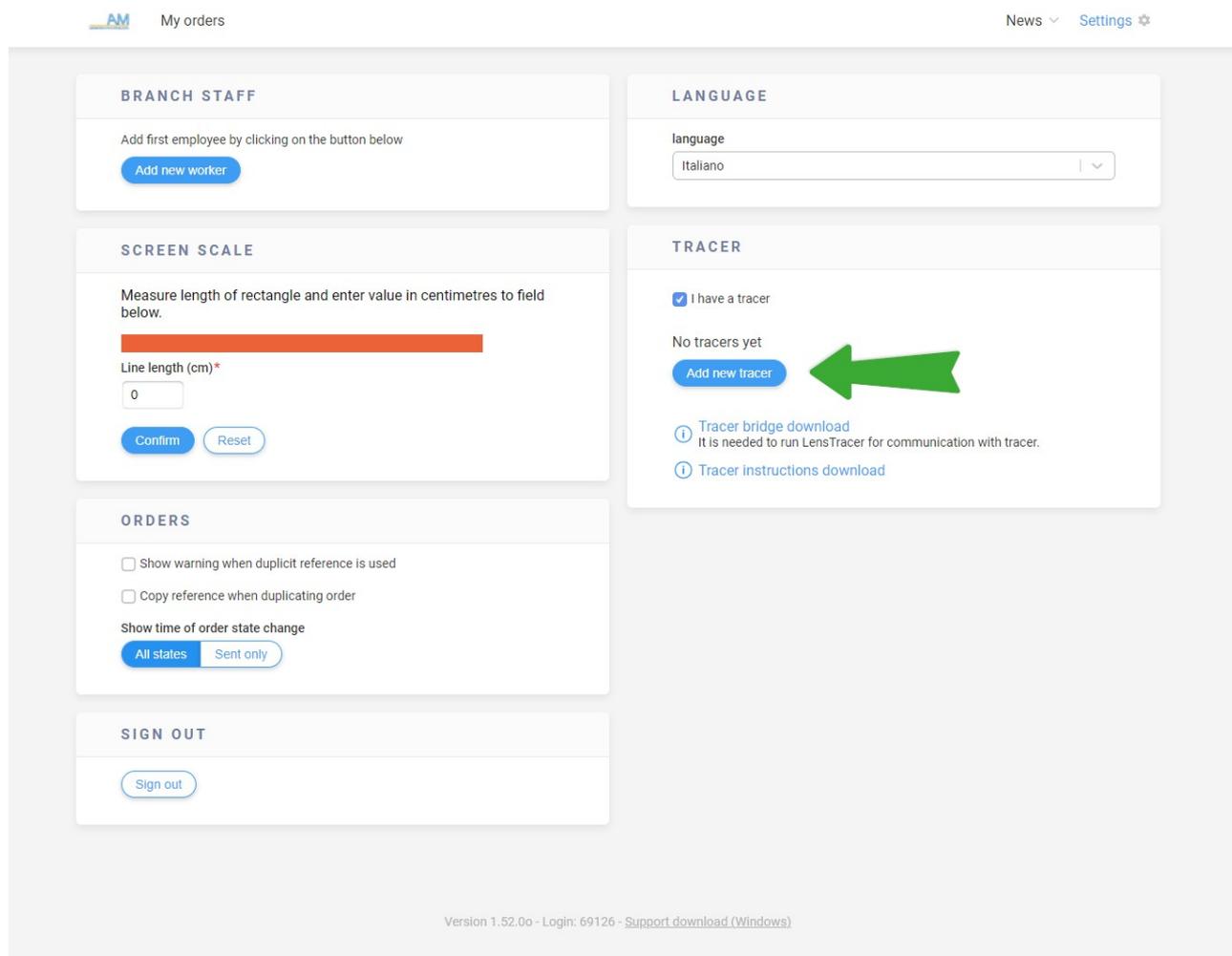


The screenshot shows the 'Settings' page of the LuxOptic portal. At the top, there is a navigation bar with 'AM My orders' on the left and 'News' and 'Settings' on the right. The main content area is divided into several sections:

- BRANCH STAFF**: Includes the text 'Add first employee by clicking on the button below' and a blue button labeled 'Add new worker'.
- LANGUAGE**: Features a dropdown menu for 'language' currently set to 'Italiano'.
- SCREEN SCALE**: Contains the instruction 'Measure length of rectangle and enter value in centimetres to field below.' followed by a red horizontal bar, a text input field for 'Line length (cm)*' with the value '0', and 'Confirm' and 'Reset' buttons.
- ORDERS**: Includes two checkboxes: 'Show warning when duplicit reference is used' and 'Copy reference when duplicating order'. Below them is a section for 'Show time of order state change' with 'All states' and 'Sent only' buttons.
- SIGN OUT**: Contains a 'Sign out' button.
- TRACER**: This section is highlighted with a green arrow. It contains a checked checkbox 'I have a tracer', the text 'No tracers yet', and a blue button 'Add new tracer'. Below this are two informational links: 'Tracer bridge download' (with a note 'It is needed to run LensTracer for communication with tracer.') and 'Tracer instructions download'.

At the bottom of the page, the footer text reads: 'Version 1.52.00 - Login: 69126 - Support download (Windows)'.


Si aprirà una finestra con i campi di configurazione del tracciatore che dovrai compilare in base alle Tue necessità.

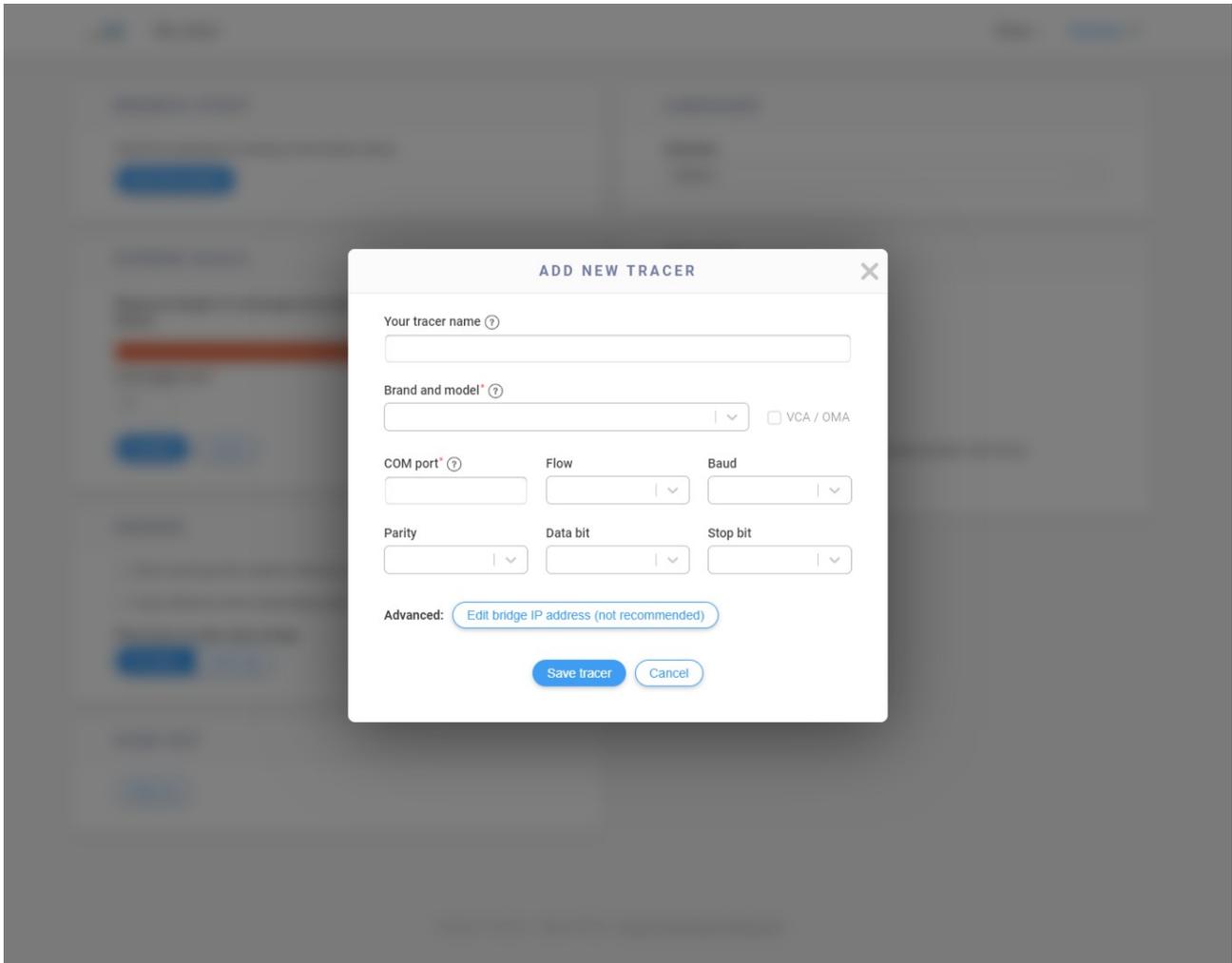

Una volta impostati i settaggi del tracciatore è possibile scaricare il programma in grado di collegare il Tracciatore al Programma degli Ordini.

Cliccare su **Scarica Ponte Tracer** per avviare il download del file **LensTracer.exe** .

Per praticità vi consigliamo di scaricare il file all'interno di una cartella nella sezione documenti rinominata **LENSTRACER** .

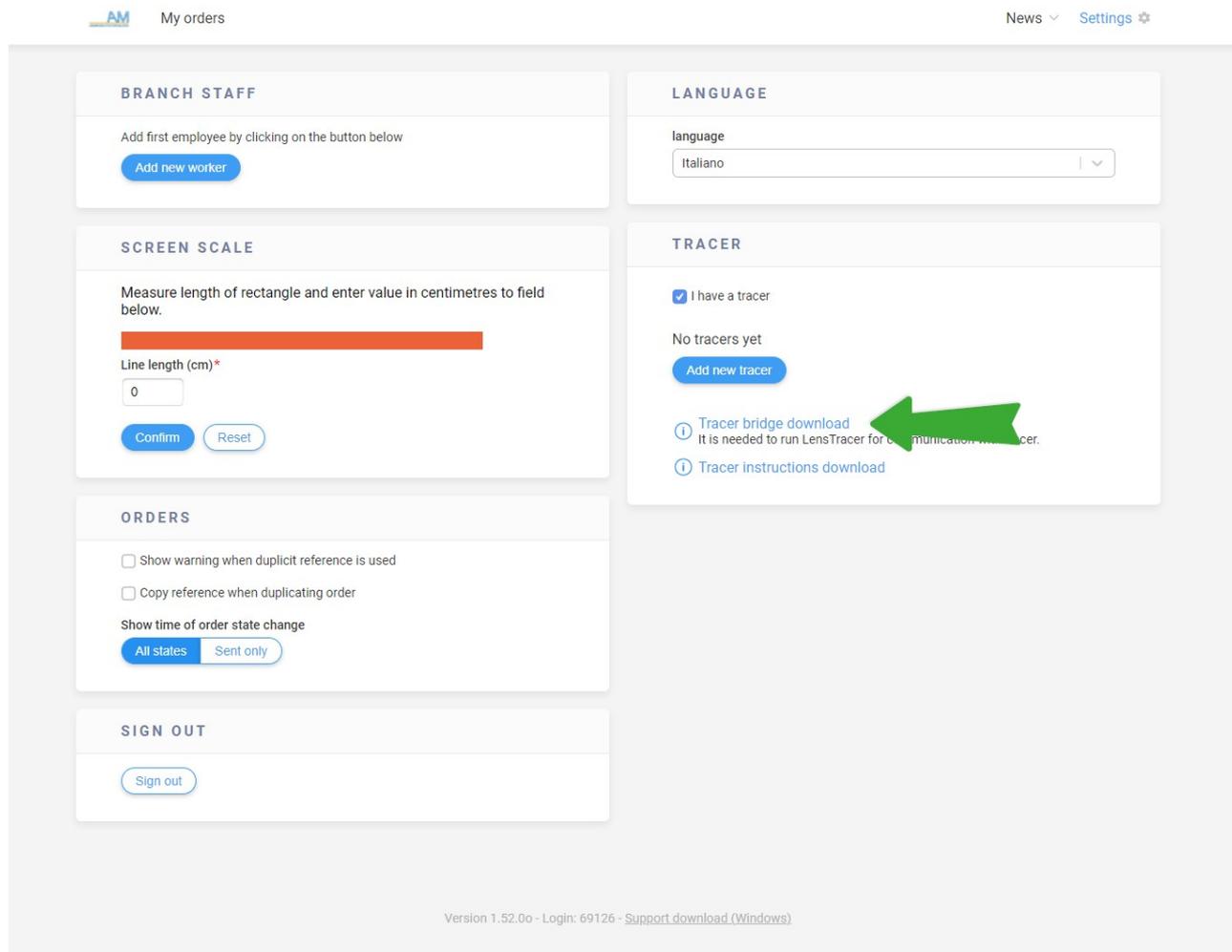

The screenshot shows the 'Settings' page of the Luxoptic application. The interface is organized into several sections:


- BRANCH STAFF**: Includes a button 'Add new worker'.
- LANGUAGE**: A dropdown menu currently set to 'Italiano'.
- SCREEN SCALE**: A section for measuring a rectangle, featuring a red bar and a text input field for 'Line length (cm)*' with a value of '0'. It includes 'Confirm' and 'Reset' buttons.
- ORDERS**: Contains two checkboxes: 'Show warning when duplicit reference is used' and 'Copy reference when duplicating order'. Below them are buttons for 'All states' and 'Sent only'.
- SIGN OUT**: A 'Sign out' button.
- TRACER**: A section for managing tracers. It has a checked checkbox 'I have a tracer' and an 'Add new tracer' button. Below this are two links: 'Tracer bridge download' (highlighted with a green arrow) and 'Tracer instructions download'. A note under the first link states: 'It is needed to run LensTracer for communication with the tracer.'

At the bottom of the page, the text reads: 'Version 1.52.00 - Login: 69126 - Support download (Windows)'.

Una volta scaricato il programma dovete eseguirlo cliccando 2 volte sull'icona del file scaricato.

Comparirà una finestra che vi avvisa che un'App sconosciuta sta venendo installata.

Dovete come prima cosa cliccare sul link **Ulteriori Informazioni** presente alla fine del paragrafo di testo. A questo punto comparirà il pulsante **Esegui comunque** , cliccateci .

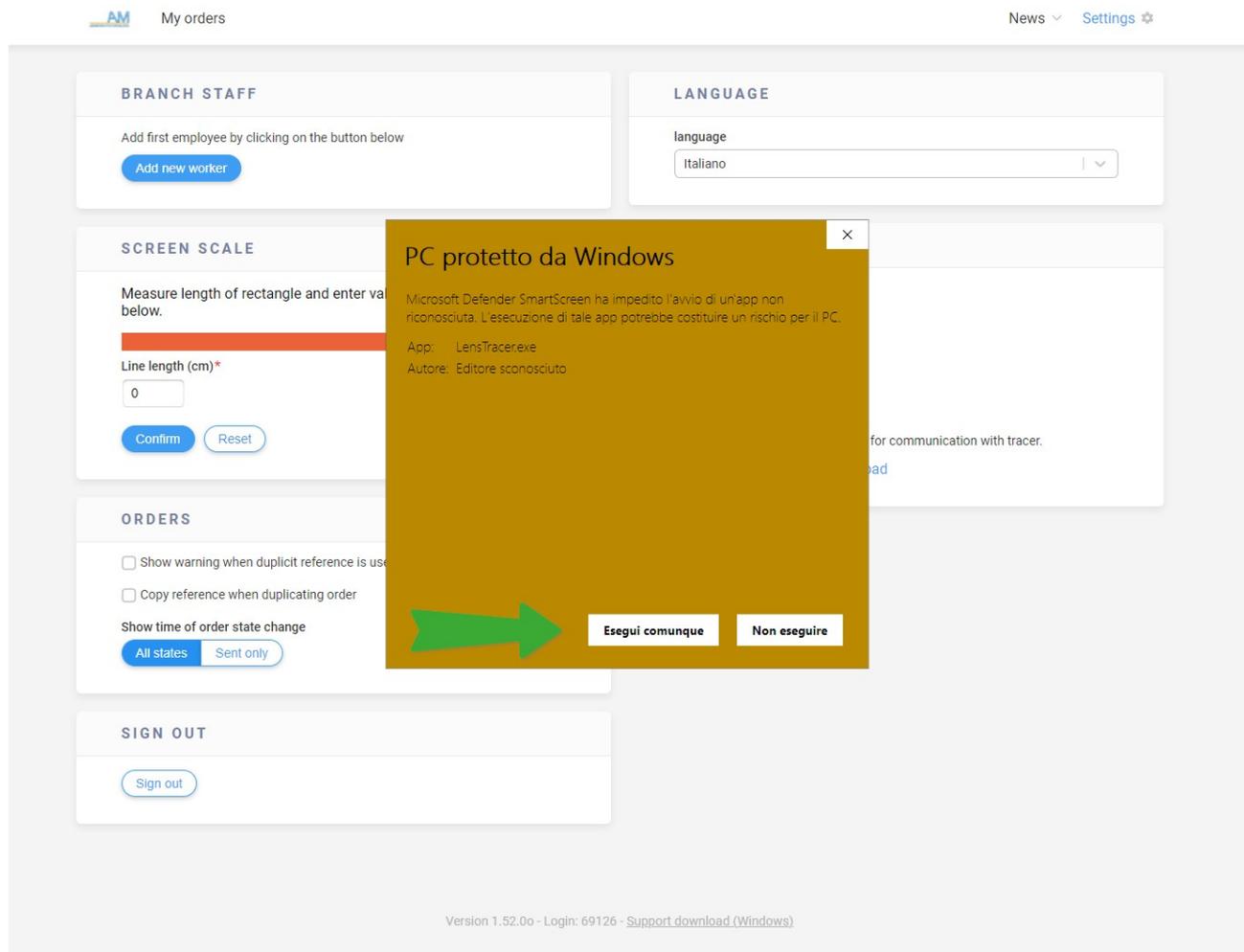


The screenshot shows a web application interface with several sections: "BRANCH STAFF" with an "Add new worker" button; "LANGUAGE" with a dropdown menu set to "Italiano"; "SCREEN SCALE" with a measurement tool and "Confirm" and "Reset" buttons; "ORDERS" with checkboxes for warnings and a "Show time of order state change" section with "All states" and "Sent only" buttons; and "SIGN OUT" with a "Sign out" button. A Windows security warning window titled "PC protetto da Windows" is overlaid on the interface. The warning text reads: "Microsoft Defender SmartScreen ha impedito l'avvio di un'app non riconosciuta. L'esecuzione di tale app potrebbe costituire un rischio per il PC." Below the text, it lists "App: LensTracereva" and "Autore: Editore sconosciuto". At the bottom of the warning window, there are two buttons: "Esegui comunque" (highlighted with a green arrow) and "Non eseguire". The footer of the page contains the text "Version 1.52.0a - Login: 69126 - Support download (Windows)".

Quando il programma è in esecuzione comparirà nell'area delle icone sulla barra delle applicazioni di Windows l'icona del file scaricato.

Se questa icona non è presente nell'area indicata è necessario avviare nuovamente il programma altrimenti non è possibile stabilire il collegamento tra il Tracciatore ed il Programma degli ordini.


Se invece l'icona è presente sarete in grado di effettuare ordini con tele bisellatura.

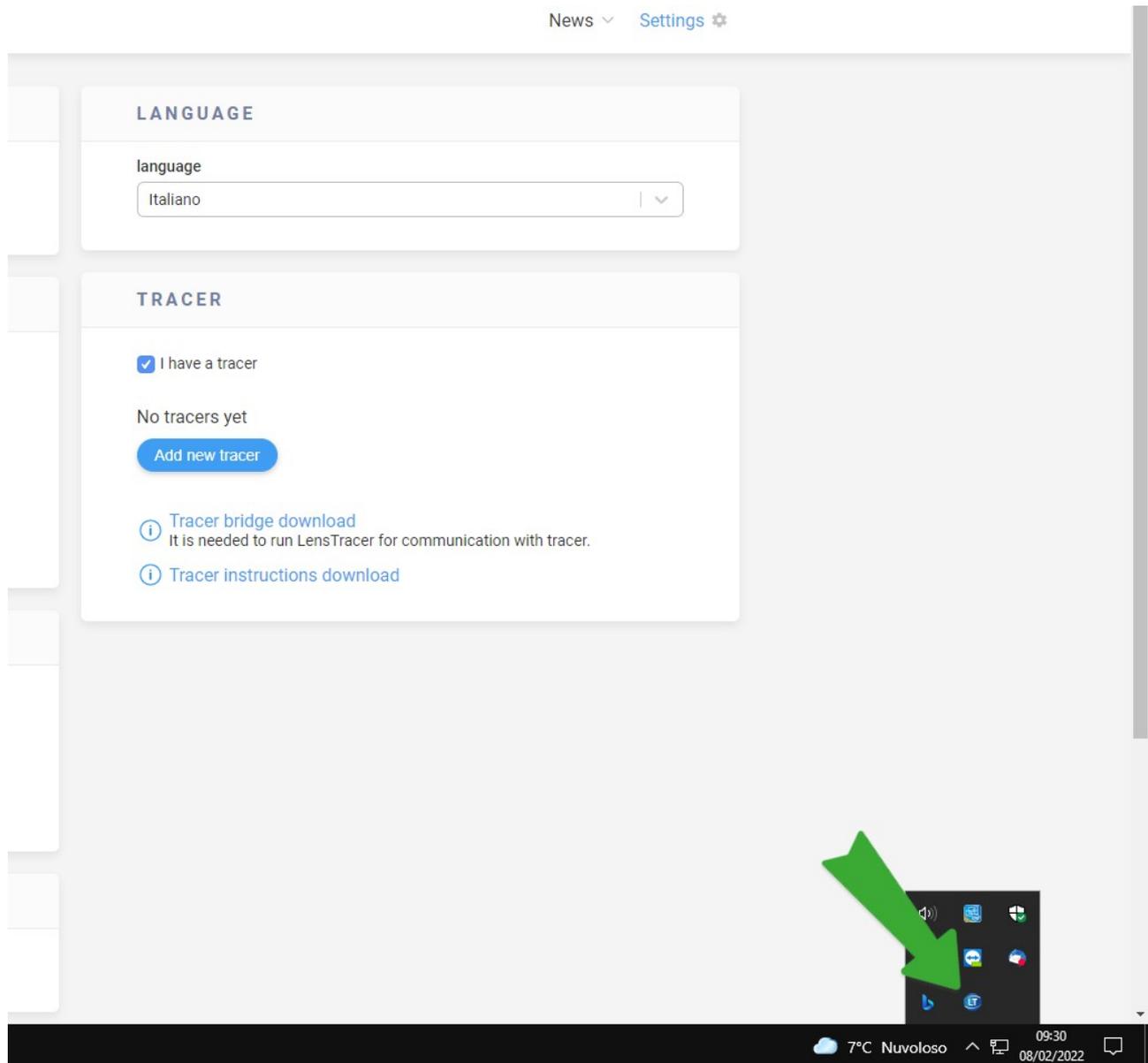


Per effettuare un nuovo ordine cliccare su **Nuovo Ordine** .



Selezionare **Tele Bisellatura** .

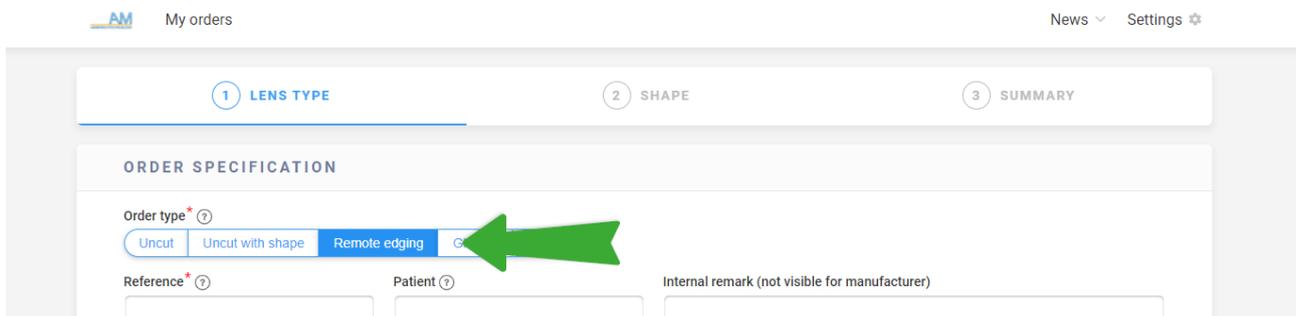

Al secondo passaggio, **Sagoma / Montature** , selezionare **Traccia con Tracer** .

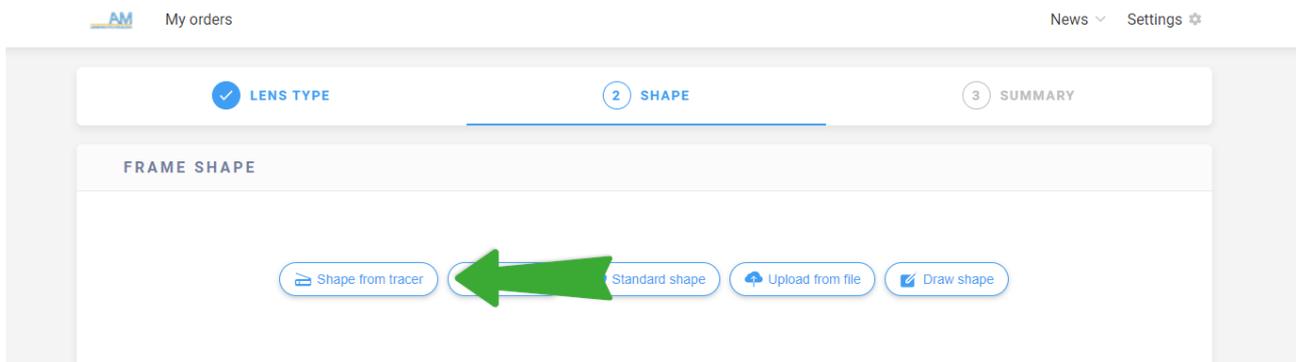

Terminata la tracciatura della montatura, il sistema invierà automaticamente la forma letta al PC.

Apparirà una piccola finestra dove è necessario cliccare su **Save** , nel programma nella sezione ordini apparirà la sagoma letta.